


EMC-150・720/730型 バッテリ絶縁手順

①車椅子の固定

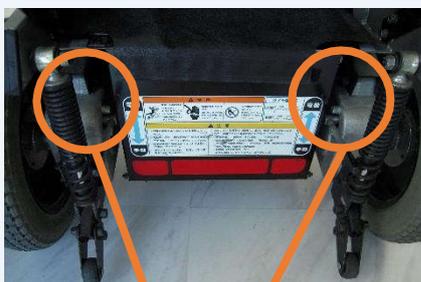

クラッチレバー
電動に切替


はじめに
作業を行う際は、モータのクラッチレバーを電動に切り替えて車輪部が固定された状態で行ってください。

②電源を切る



操作ボックスの電源スイッチを「切」に合わせます。

③カバーを開ける

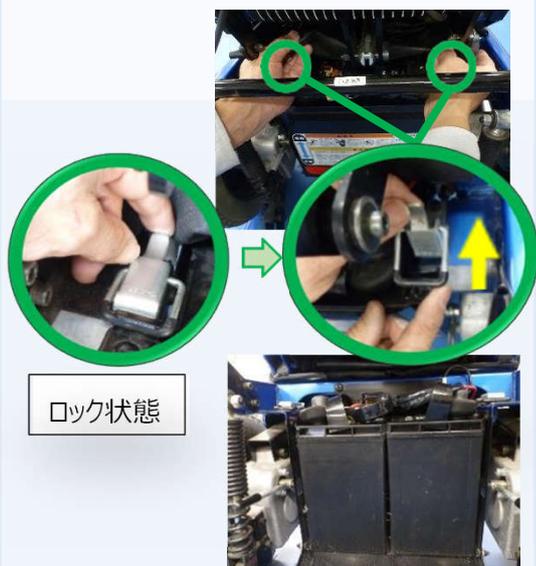

背面のバッテリーケース上部のビニールカバーのマジックテープをはがし、カバープレートのロック錠を上側に回転させ引き上げるとロックが外れます。ロックが外れた状態で、カバープレートを手前に引いてカバーを開けます。

④コネクタを抜く



カバーを開けると、バッテリーがあります。背面から覗き込みバッテリーの上にあるコネクタ挿し込み口の2本のコネクタをコネクタ左右のロックをつまみながら手前に引き抜きます。


EMC-150・720/730型 バッテリ絶縁手順

⑤配線の処理



外した2本のコネクタをバッテリー上部の隙間に入れ込んで、なるべく動かないようにします。

⑥カバーを閉じる

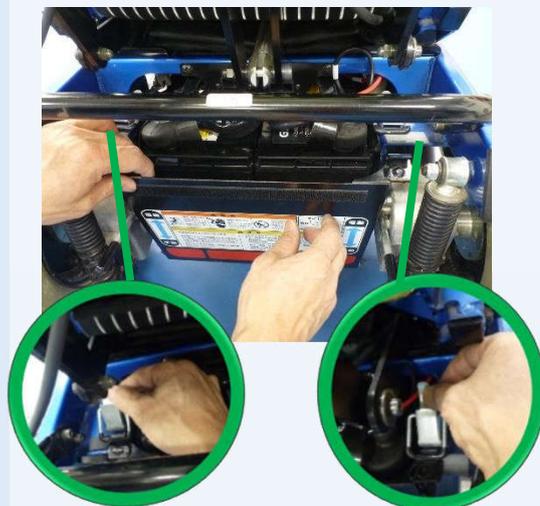

左右のロック錠をもとに戻して、カバープレートを閉じます。

⑦完了



背面のバッテリーケース上部のビニールカバーのマジックテープをもとに戻して完了