


EMC-920/930・240L/250L 絶縁手順

①車椅子の固定

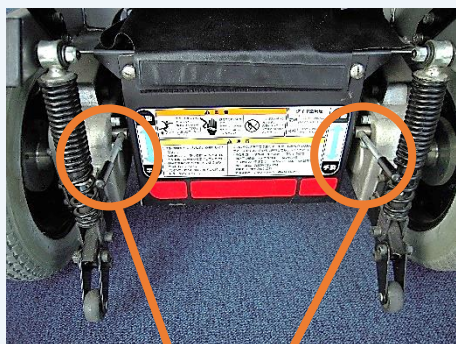

クラッチレバー
電動に切替


はじめに
作業を行う際は、モータのクラッチレバーを電動に切り替えて車輪部が固定された状態で行ってください。

②電源を切る



操作ボックスの電源スイッチを「切」に合わせます。

③カバーを開ける

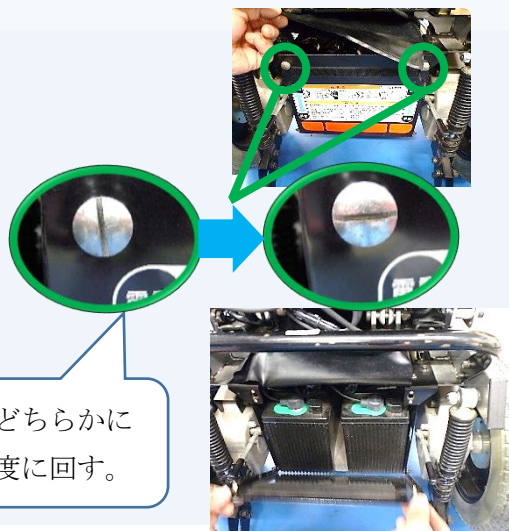

左右どちらかに
90度回す。

背面のバッテリーケース上部のビニールカバーのマジックテープをはがし、カバープレートの丸ピンを90度回すとロックが外れます。ロックが外れた状態で、カバープレートを手前に引いてカバーを開けます。

④コネクタを抜く



カバーを開けると、バッテリーがあります。背面から覗き込みバッテリーの上にあるコネクタ挿し込み口の2本のコネクタをコネクタ左右のロックをつまみながら引き抜きます。


EMC-920/930・240L/250L 絶縁手順

⑤配線の処理



外した 2 本のコネクタをバッテリー上部の隙間に入れ込んで、なるべく動かないようにします。

⑥完了

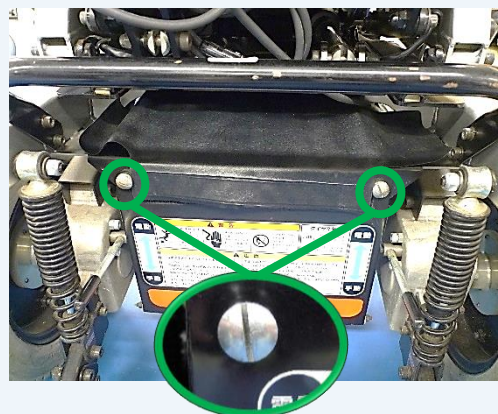

背面のカバープレートを閉じます。カバープレートについている丸ピンの溝を縦方向にして押し込むとロックがかかります。

ビニールカバーを元に戻します。

完了