


Light6 絶縁手順


①車椅子の固定

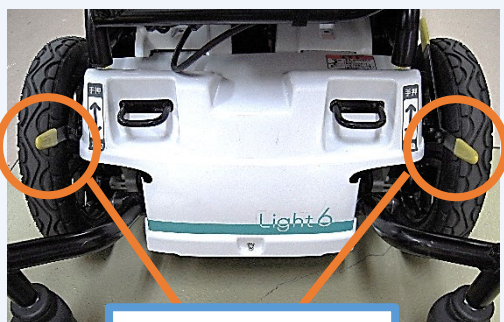

クラッチレバー
電動に切替


はじめに
作業を行う際は、モータのクラッチレバーを電動に切り替えて車輪部が固定された状態で行ってください。

③カバーを開ける 1

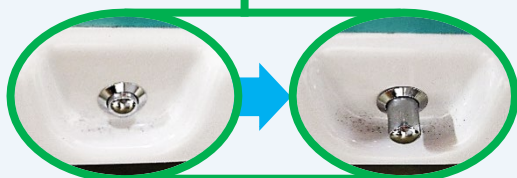

背面のカバー下面中央の凸ピンを押し込んで放すとロックが外れます。ロックが外れるとピンが外に飛び出した状態になります

②電源を切る

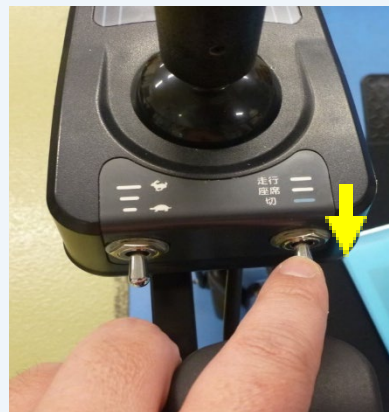

操作ボックスの電源スイッチを「切」に合わせます。


④カバーを開ける 2



ロックが外れたらカバーの左右の端を持って手前に引っ張ります。この時、カバーを上を少し持ち上げるように引っ張ると外れやすいです。


Light6 絶縁手順

⑤コネクタを抜く 1

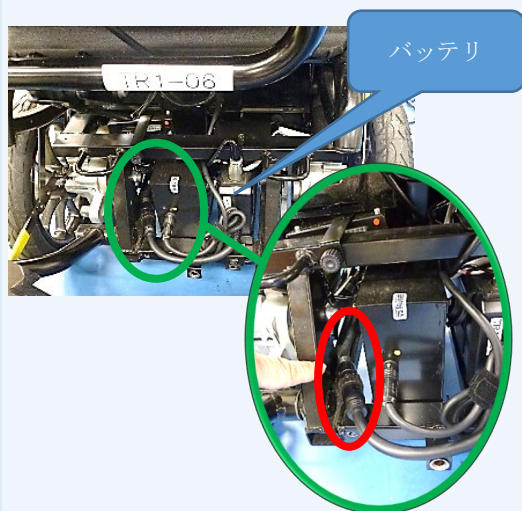


カバーを完全に取り外し、径の一番太い線(バッテリー線)を引っ張り出します。(中央に配置されたボックスの右側がバッテリーです)

⑥コネクタを抜く 2

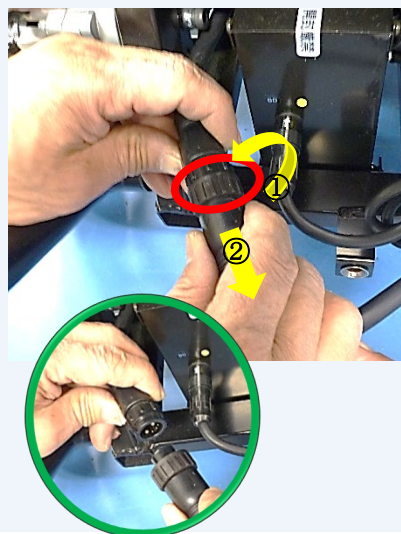


コネクタ部の中央部分を左方向に回してコネクタ接続を外します。コネクタ部を回すときはネジ部分が完全に外れるまで回してください。

⑦配線の処理

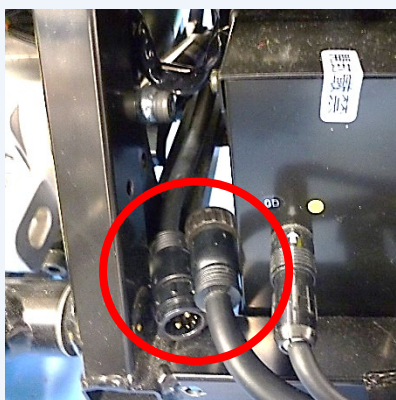

コネクタの接続を外したら、バッテリー線の端子部分が、それぞれ接触しない状態にし、元の場所に押し込みます。

⑧-1 カバーを閉じる

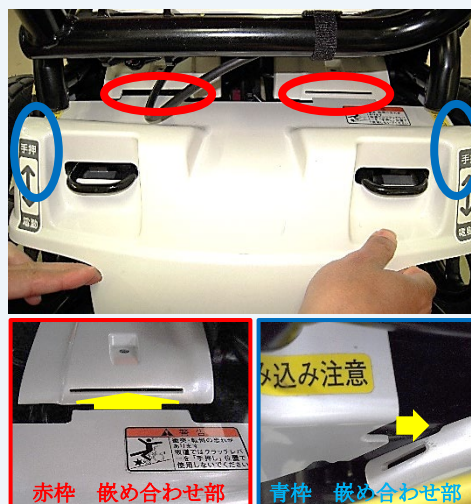

背面カバーを外した時と逆の手順で本体に嵌め込みます。この時、本体の凹とカバーの凸を嵌め合わせてください(4箇所：詳細は次ページ)。

Light6 絶縁手順

⑧-2 カバーを閉じる



カバー嵌め込み例

上 正常

下 NG(嵌め込み不足)

⑧-3 カバーを閉じる




カバー嵌め込み例

上 正常

下 NG(嵌め込み不足)

⑩完了

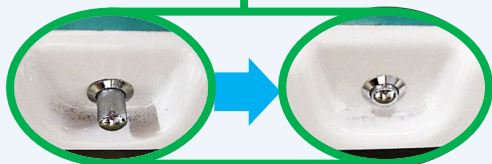

背面のカバー下面中央の凸ピンを本体下面中央の凹部に嵌るようにセットして凸ピンを押し込むとロックされます。ロックされるとピンが中に引っ込みます。 完了