


EMC-620・630 タイダウン箇所指示書



EMC-620/630 外観

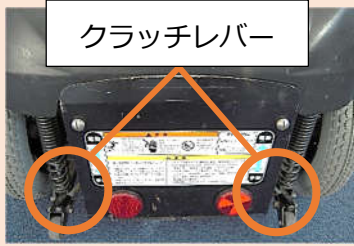

クラッチレバー

はじめに

作業を行う際は、モータのクラッチレバーを電動に切り替えて車輪部が固定された状態で行ってください。また、絶縁作業が実施済のをご確認ください。

(別途、バッテリー絶縁手順参照)

全体外観 (一例)

タイダウンはOマークのついた写真を参考に指示箇所に対してきちんと行ってください
禁止箇所へのタイダウンは車いす破損の危険がありますので行わないでください



車椅子前方(繫縛可能箇所)



車椅子後方(繫縛可能箇所)



車椅子前方(繫縛禁止箇所)



フットパイプ



前輪キャスター

車椅子後方(繫縛禁止箇所)



背スライドフレーム



サスペンション本体

※椅子フレームでの固定は行わないで下さい。